

GAMME :

03 | Œil Sec

RÉFÉRENCE :

77502

FABRIQUANT :



DESCRIPTION DU PRODUIT



LidStick®

SIMPLIFIER LA MANIPULATION DES PAUPIÈRES

Le LidStick® est un instrument spécialement conçu pour les professionnels de la vue. Il remplace les applicateurs en coton ou en bois souvent inconfortables et abrasifs pour la manipulation des paupières.

Il s'avère particulièrement utile pour des procédures telles que la Meibographie, les Scintigraphies sclérales cornéennes (CSP), l'Expression douce des glandes de Meibomius, et le débridement et nettoyage minutieux des bords des paupières. Il permet également d'estimer la taille d'un chalazion et d'évaluer les changements pigmentaires au bord de la paupière.

CONDITIONNEMENT : 2 ROULEAUX DE 100 UNITÉS

CARACTÉRISTIQUES

- Fonctionnel
- Professionnel
- Produit à usage unique qui doit être jeté avec les déchets résiduels directement après utilisation
- Convient aux paupières supérieure et inférieure
- Conception en silicone et en plastique de qualité médicale

CE QU'IL FAUT RETENIR :

1. Produit à usage unique
2. Conditions de stockage : -10° - +55 °C
3. Durée de conservation 3ans

UTILISATION

Rétractation



L'extrémité arrondie du LidStick® peut facilement être utilisée pour rétracter la paupière supérieure ou inférieure. Cette technique est particulièrement utile pour cartographier les surfaces sclérales supérieure et inférieure, et photographier une cornée sclérale, à l'aide du rapport CSP du Pentacam® par exemple.

Éversion



Cette technique permet l'éversion de la paupière supérieure (extrémité plate du LidStick®) et inférieure (extrémité arrondie du LidStick®), notamment pour une évaluation morphologique des glandes de Meibomius ou pour examiner la conjonctive tarsale pour un diagnostic de l'œil sec à l'aide du Keratograph 5M.

Pression



L'extrémité arrondie du LidStick® vous permet d'exercer une pression sur les orifices des glandes de Meibomius du bord de la paupière supérieure et inférieure.

Mesure



Le LidStick® est livré avec une règle intégrée à l'extrémité plate

Débridement



Cette technique permet l'éversion de la paupière supérieure (extrémité plate du LidStick®) et inférieure (extrémité arrondie du LidStick®), notamment pour une évaluation morphologique des glandes de Meibomius ou pour examiner la conjonctive tarsale pour un diagnostic de l'œil sec à l'aide du Keratograph 5M.